



## Pasek stomijny stabilizująco-mocujący CORSINEL BELT z panelem do wycięcia otworu na worek stomijny


**Pasek stomijny Corsinel Belt stabilizuje i podtrzymuje obszar wokół stomii. Silikonowa warstwa antypoślizgowa zapobiega przesuwaniu się paska w górę i w dół. Pasek posiada specjalny obszar umożliwiający łatwe wycięcie stabilnego otworu, dopasowanego do rozmiaru worka stomijnego.**




Pasek stomijny Corsinel Belt jest przeznaczony dla osób z kolostomią, ileostomią, urostomią.

Wyrób medyczny do podtrzymywania i stabilizacji okolicy okołostomijnej, stosowany u osób ze stomią. Odpowiedni w przypadkach, gdy potrzebne jest indywidualne dopasowanie otworu w pasku stomijnym do wielkości worka stomijnego. Posiada wyznaczone miejsce umożliwiający wycięcie otworu dopasowanego do wielkości przylepca worka/płytki stomijnej.

Idealnie dopasowuje się do kształtów ciała, na brzuchu jest wyższy, na plecach niższy. Zapewnia optymalny komfort i swobodę ruchów. Rozciąga się w 4 kierunkach. Wyprodukowany z materiału przepuszczającego powietrze i wilgoć. Posiada kieszeń ułatwiającą zakładanie paska.

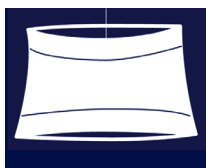

Anatomicznie dopasowana tylna część paska

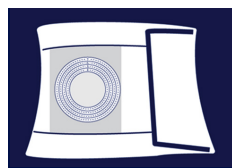

Szablon do wycięcia indywidualnego otworu (w zestawie)

### ROZMIAR / OBWÓD W TALII

S	78-90 cm	XL	102-116 cm
M	89-98 cm	2XL	112-130 cm
L	94-106 cm	3XL	126-148 cm

Wycięcie w panelu paska stabilnego otworu na worek stomijny zwykłymi nożyczkami jest bardzo proste – materiał nie strzępi się. Zobacz film instruktażowy na stronie [www.wellandmedical.pl](http://www.wellandmedical.pl)

**Specjalistyczne paski stomijne** duńskiej firmy TYTEX S.A. to wysokospecjalistyczne wyroby najwyższej jakości, produkowane z certyfikowanych, przyjaznych dla skóry materiałów. Przystosowane w najwyższym stopniu do potrzeb pacjentów stomijnych.

**TYTEX®**



## Pasek stomijny Stomasafe Plus, mocująco-ochronny, dwuwarstwowy, z otworem na worek stomijny



BIAŁY



BEŻOWY



CZARNY

Przeznaczony dla osób ze stomią – poprawia komfort życia.

Może być stosowany ze sprzętem stomijnym jednoczęściowym lub dwuczęściowym.

- ułatwia życie ze stomią
- wykonany z wysokiej jakości oddychającej mikrofibry, nie zawiera lateksu, jest bezszwowy
- wygodny w noszeniu, nie drażni skóry
- doskonale stabilizuje worek stomijny
- redukuje efekt szeleszczenia worka
- ogranicza słyszalność wydostających się gazów
- zabezpiecza skórę przed ciągłym kontaktem z powierzchnią worka
- odprowadza wilgoć z powierzchni skóry
- szczególnie polecany dla osób aktywnych
- dostępny w trzech kolorach – białym, beżowym i czarnym; w kolorze beżowym jest niewidoczny nawet pod jasnym ubraniem



1. Załóż pasek Stomasafe Plus jak bieliznę – nadruk fabryczny powinien znajdować się po wewnętrznej stronie paska, w jego górnej części. Upewnij się, że otwór na worek stomijny w wewnętrznej warstwie paska znajduje się w miejscu worka stomijnego.

2. Zewnętrzną warstwę paska podnieś do góry. Przełóż worek stomijny przez otwór w wewnętrznej warstwie paska, od wewnętrznej strony.

3. Opuść w dół zewnętrzną warstwę paska, umieszczając dolną część worka stomijnego w małej kieszeni znajdującej się w zewnętrznej warstwie paska – od wewnątrz.

### ROZMIAR / OBWÓD W TALII

S/M	80-110 cm
M/L	105-125 cm
L/XL	120-140 cm

### SPECJALISTYCZNE PASKI STOMIJNE MOŻNA ODEBRAĆ W RAMACH REFUNDACJI I POZA NIĄ:

- w Firmowym Sklepie Medycznym Welland Medical Polska, ul. Słomińskiego 19 lok. 505, 00-195 Warszawa, tel. 790 420 033, tel./fax 22 412 80 12, e-mail: [zamowienia@wellandmedical.pl](mailto:zamowienia@wellandmedical.pl)
- w dobrych sklepach medycznych na terenie kraju – wykaz dostępny pod telefonami Centrum Pomocy Stomijnej: tel. 790 420 069, 790 420 068

